

Behelfs-Mund-Nasen-Maske (Community-Maske)

- Wiederverwendbare Mund-Nasen-Maske mit Gummiband
- Vor dem ersten Tragen waschen
- Maske absetzen und wechseln sobald sie durchfeuchtet ist
- Begrenzt das Austreten von Speicheltröpfchen des Maskenträgers in die Umgebung
- Stellt eine physische Barriere dar vor unbewussten Berührungen der Hände an Mund und Nase
- Für den (all)täglichen Gebrauch geeignet
- Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden !
- Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden.
- Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.
- Nicht zertifiziertes Produkt, nicht für den medizinischen Bereich geeignet
- Company-Fashion übernimmt keine Produkthaftung

Pflegeanleitung

- Wir empfehlen, die Maske nach dem Gebrauch möglichst sofort zu waschen oder luftdicht in einen Beutel zu verschließen.
- Unbedruckte Masken waschbar bis 95°C, bedruckte Masken bis 60°C -> am besten legen Sie die Maske für 5-10 Minuten in das sehr heiße bis kochende Wasser. Nach dem Herausnehmen auf einem Handtuch glattziehen und von der Rückseite mit Dampf trockenbügeln – niemals direkt auf Bedruckung bügeln !
- Ein tägliches Waschen in der Waschmaschine verkürzt die Lebensdauer der Masken und wird daher nicht empfohlen.

Näheres auch in den Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte unter

<https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html>

sowie auf der Internetseite des Robert Koch Institutes

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html